




Schnelle und flexible
Platzierung
dank des innovativen
zirkulären Designs


Großporiges und
leichtes Gewirke:
nur 35 g/m²

Optimierte Körperverträglichkeit
durch die einzigartige Titan-
oberfläche

TILENE® Guard

Das titanisierte Netz für die Prävention und
medizinische Versorgung parastomaler Hernien

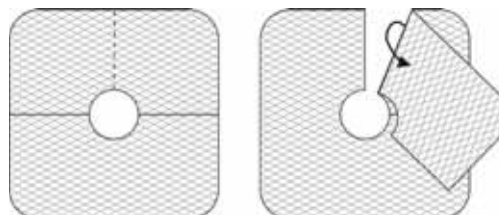

 Titanized Polymers

pfm

Titanisiertes Weichgewebeverstärkungsimplantat zur Versorgung parastomaler Hernien

Anwendung

TiLENE® Guard ist zur Prävention bzw. Reparatation parastomaler Hernien bestimmt.

Design

TiLENE® Guard wurde im Hinblick auf bestmöglichen Patientenkomfort entwickelt. Das innovative zirkuläre Design ermöglicht eine schnelle und flexible Operation. Das TiLENE® Guard Set besteht aus zwei Komponenten: TiLENE® Guard und TiLENE® Mesh.

Material

- ▶ Titanisiertes Polypropylen
- ▶ Porendurchmesser ≥ 1 mm
- ▶ Prothetisches Gewirke
- ▶ Mechanische Haltekraft ≥ 16 N/cm
- ▶ Monofiler Faden
- ▶ Lasergeschnittene Netzkanten

Mit nur 35 g/m² des TiLENE® Guard und 35/65 g/m² des TiLENE® Guard (dual-weight) entspricht dieses Implantat den hohen Anforderungen der modernen, patientenorientierten Hernienchirurgie.

Implantation


TiLENE® Guard wird für die Prävention und Versorgung parastomaler Hernien bei laparoskopischen und offenen Operationen verwendet. Zur Verstärkung der Faszienreparation wird TiLENE® Guard mit ausreichender Überlappung (≥ 5 cm) um das Colon gelegt, wo es durch Naht, Clips, Klammern oder Klemmen fixiert werden kann. Mithilfe der Sandwich-Technik wird das Stoma mit TiLENE® Mesh zentral bedeckt und lateralisiert. Die Fixierung des TiLENE® Mesh erfolgt in ähnlicher Weise wie beim TiLENE® Guard.

Die herausragende Wirkungsweise von titanisiertem Polypropylen in der Hernienchirurgie wurde bereits in mehr als 200.000 Operationen weltweit unter Beweis gestellt.

REF	Beschreibung	VE
6000605	TiLENE® Guard light 14 x 14 cm	3
6000607	TiLENE® Guard light 20 x 14 cm	3
6000606	TiLENE® Guard dual-weight 14 x 14 cm	3
6000608	TiLENE® Guard dual-weight 20 x 14 cm	3
6000525	TiLENE® Guard Set light 14 x 14 cm TiLENE® Mesh light	3
6000526	TiLENE® Guard Set light 20 x 14 cm TiLENE® Mesh light	3
6000527	TiLENE® Guard Set dual-weight 14 x 14 cm TiLENE® Mesh light	3
6000528	TiLENE® Guard Set dual-weight 20 x 14 cm TiLENE® Mesh light	3




TiLENE® Guard

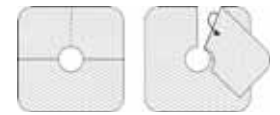

Neues zirkuläres Design: schnelle, flexible und zentrierte Netzplatzierung. Das Stoma wird vom überlappenden Teil des Netzes sicher und schnell umschlossen.



TiLENE® Mesh

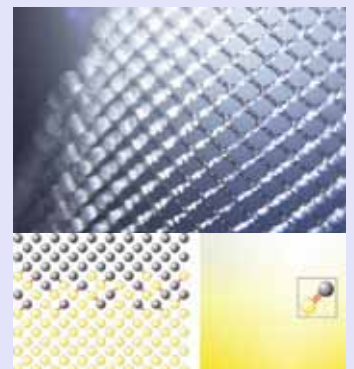

Exzellente Körpverträglichkeit durch eine einzigartige Kombination eines Verbundmaterials mit einer kovalent gebundenen Titanschicht sowie einer leichten offenporigen Netzstruktur.