





Neues zirkuläres Design


Exzellente Körperverträglichkeit

Schnelle und flexible Platzierung

TiPATCH®

Das titanisierte, vorgeformte Netz für die offene medizinische Versorgung von Inguinalhernien

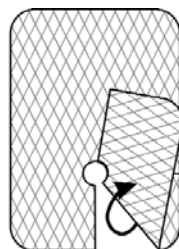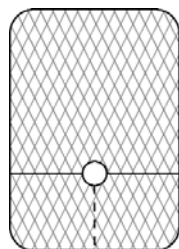

 Titanized Polymers

ptm

Das titanisierte, vorgeformte Netz für Inguinalhernien

Anwendung

TiPATCH® ist für die offene Versorgung direkter und indirekter Inguinalhernien bestimmt.

Design

TiPATCH® ist ein titanisiertes, vorgeformtes Herniennetz auf Basis des innovativen zirkulären Designs für schnelle und flexible Operationen.

Material

- ▶ Titanisiertes Polypropylen
- ▶ Porendurchmesser ≥ 1 mm
- ▶ Prothetisches Gewirke
- ▶ Mechanische Haltekraft ≥ 16 N/cm
- ▶ Monofiler Faden
- ▶ Lasergeschnittene Netzkanten

Mit einem Flächengewicht von nur 35 g/m² entspricht TiPATCH® den hohen Anforderungen der modernen, patientenorientierten Hernienchirurgie.


Implantation

TiPATCH® wird für die Versorgung direkter und indirekter Inguinalhernien verwendet.


TiPATCH® wird nach Präparation und Versorgung des Bruchsackes auf der Vorderfläche der hinteren Wand des Leistenkanals mit der Öffnung um den Samenstrang herum platziert, um eine bestehende direkte Hernie zu beseitigen und/oder durch die Verstärkung das Wiederauftreten einer direkten oder indirekten Hernie zu verhindern. Die Enden können durch Nähte miteinander verbunden werden.

Die herausragende Wirkungsweise von titanisiertem Polypropylen in der Hernienchirurgie wurde bereits in mehr als 200.000 Operationen weltweit unter Beweis gestellt.

REF	Beschreibung	VE
6000442	TiPATCH® light 35 g/m ² , 7 x 10 cm	3
6000445	TiPATCH® strong 65 g/m ² , 7 x 10 cm	3

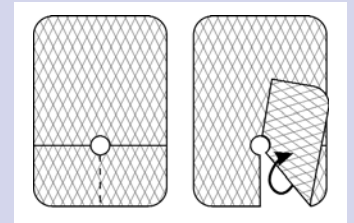

Neues zirkuläres Design: schnelle, flexible und zentrierte Netzplatzierung. Der Samenstrang wird vom überlappenden Teil des Netzes sicher und schnell umschlossen.

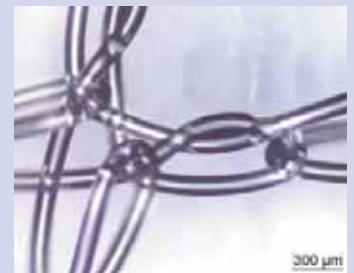

Die glatte und flexible Faser bietet optimale Körperverträglichkeit und Patientenkomfort ohne Einbußen in puncto Festigkeit.



Exklusivvertrieb:
Zertifiziert nach: ISO 13485 : 2003

pfm · Produkte für die Medizin AG
Wankelstraße 60 · D - 50996 Köln, Deutschland
Tel. +49 (0) 2236 9641-0 · Fax +49 (0) 2236 9641-20
zentrale@pfm-ag.de · www.pfm-ag.de



Hersteller:
Zertifiziert nach: ISO 13485 : 2003

GfE Medizintechnik GmbH
Hoefener Straße 45 · D-90431 Nürnberg
Tel.: +49 (0) 911 9315-601 · Fax +49 (0) 911 9315-650
info@gfe-medical.com · www.gfe-medical.com